

AlphaTrakTM3 寵糖儀[®]

動物血糖監控系統

簡易使用說明



zoetis

AlphaTrak 3 動物血糖機設定

在進行檢測前，須先進行動物血糖機設定-

音量、檢測單位、時間和日期

在血糖機關機時 (未插入試紙)

長按 **m** 鍵 3 秒直到畫面顯示 SET

按 **m** 鍵可以跳過提醒警示設定

音量

按 **c** 鍵來設定音量



按 **m** 鍵來儲存您選定的設定

檢測單位

設定測量單位

備註：血糖檢測結果以毫克 / 分升 (mg/dL) 為單位

(美國經常使用的單位)


按 **c** 鍵將單位換成毫莫耳 / 升 (mmol/L)

(美國以外的區域經常使用的單位)

按 **m** 鍵來儲存您偏好的設定

日期

設定日期：

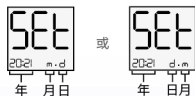

按 **c** 鍵來變更年份。按 **m** 鍵儲存

當月-日或日-月的顯示在閃爍時

此時按 **c** 鍵來變更格式

當閃爍的格式為您偏好的顯示格式時

按 **m** 鍵儲存設定

按 **c** 鍵來調整日期和月份，按 **m** 鍵選擇

時間

設定時間：



按 **c** 鍵來變更為 12 小時制或 24 小時制格式

按 **m** 鍵儲存設定

按 **c** 鍵變更時間和分鐘，按 **m** 鍵儲存設定

長按 **m** 鍵 3 秒直到血糖機關機，即可儲存所有設定

現在已完成血糖機設定，可以開始使用

請遵照此說明另一面的步驟來進行檢測

美國獸醫師推薦

飼主居家監測
毛孩血糖首選品牌[®]

*AlphaTrak 3 Claim Statements Research by MedSurvey

zoetis

臺灣碩騰股份有限公司
台北市北投區石牌路一段 188 號 3 樓 02-2826-7500

寵物健康網
www.pet-care.com.tw

追蹤社群
@zoetispetcare

Zoetis 臺灣碩騰

執行血糖檢測

使用 AlphaTrak 3 血糖機和試紙條執行血糖檢測的步驟

1.



備妥檢測需要的
所有工具

2.

選擇微血管檢體的採血位置。



邊緣耳靜脈
(貓和犬)




肘部
(僅適用於犬)



腳掌墊
(貓和犬)



嘴唇內側
(僅適用於犬)

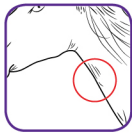

頸靜脈
(僅適用於馬)

3.



一隻手拿著採血裝置深度調節蓋，另一隻手拿著採血裝置

旋轉將深度調節蓋取下

將新的一次性採血針牢牢地插入採血裝置插槽中

扭轉將一次性採血針的保護蓋去掉，將深度調節蓋裝回

4.



採血裝置提供 6 種不同的深度等級 1 最淺；等級 6 最深
將上膛活塞向後拉至扣住準備好要採集檢體時，將採血裝置放在採血位置上，按下釋放鈕

5.



檢查試紙條瓶身上的有效日期

將正面朝上試紙條插入血糖機，血糖機會自動開機


重要：

此血糖機只能使用 AlphaTrak 3 試紙條和 AlphaTrak 3 品質控管液在 AlphaTrak 3 動物血糖機使用舊版本的 AlphaTrak 試紙條或其他品牌的試紙條和控管液，可能會導致不正確的結果

注意：

動物血液為人畜共通傳染病的潛在來源
建議在處理動物血液時，穿戴個人防護裝置。務必遵循當地的職業健康與安全法規

6.

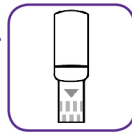

使用代碼條來確定血糖機設定適合寵物類型 (犬、貓或馬)

注意：


如果您是第一次使用 AlphaTrak 3 血糖機或準備開啟新的試紙瓶，你需要先確認代碼做法是，插入附在試紙瓶上的代碼條。按下 **C** 鍵以設定正確的代碼 (需與試紙瓶上的代碼相符)，然後按下 **M** 鍵保存
完成第一次代碼設定後，您可以在不使用代碼條的情況下輕鬆切換物種：同時按住 **C** 鍵與 **M** 鍵

7.



自寵物身上採集一小滴血

8.

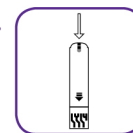

將試紙黑色區域的邊緣靠近血滴，直到聽到警示音 (如果有開啟音量)

9.



結果會在數秒內出現

毫克 / 分升 毫莫耳 / 升
(根據選擇的單位模式)